

Datum prodeje:

Razítko a čitelný podpis prodávajícího:

- 1) Firma Ortgroup Medical s.r.o., 1. Máje 3236/103, 703 00 Ostrava – Vítkovice tímto dává záruku na výrobek 2 roky ode dne vydání zboží kupujícímu.
- 2) V záruční době se Ortgroup Medical s.r.o. zavazuje vykonat nevyhnutelné opravy za účelem možnosti opětovného používání zboží v termínu do 30 dní od obdržení reklamace.
- 3) Ortgroup Medical s.r.o. si vyhrazuje právo výměny zboží v případě, že náklady na opravu uzná za nerentabilní.
- 4) V případě zjištění nesprávného fungování zboží je potřebné jej bezodkladně odeslat na adresu prodejce nebo kontaktovat prodejce.
- 5) Před použitím výrobku je potřeba se seznámit s návodem na použití a řídit se instrukcemi v něm uvedenými. Použití výrobku v rozporu s jeho určením ztrácí nárok na záruku. Výrobce nenese odpovědnost za škody vzniklé použitím výrobku v rozporu s tímto návodem k použití nebo v případě nedodržení instrukcí obsažených v tomto návodu k použití.
- 6) Záruka se nevztahuje na poškození vzniklé ostrým předmětem, poškození vzniklé v důsledku působení vnějších mechanických sil, znečištění zboží mastnými substancemi či benzínem.
- 7) TENTO ZÁRUČNÍ LIST JE PLATNÝ VÝLUČNĚ SPOLU S DOKLADEM O KOUPI. V PŘÍPADĚ REKLAMACE PROŠÍME O PŘILOŽENÍ DOKLADU O KOUPI.

Reklamáce bez dokladu o koupi nebudou akceptované.

Výrobce:



ANTAR Sp. J.
I.Groniecka-Tarnkowska, A.Tarnkowski
ul. Zawisłańska 43 03-068 Warszawa, Polsko
email antar@antar.net tel 22 518 36 00



Distribuce:

Ortgroup Medical s.r.o., 1. Máje 3236/103, 703 00 Ostrava - Vítkovice
E-mail: ortgroup@ortgroup.cz, www.ortgroup.cz
Tel.: 596 630 615

NÁVOD

K OBSLUZE INVALIDNÍCH VOZÍKŮ ERGOLITE KM-2501



Datum vydání návodu 25.05.2021
Datum poslední revize: 07.03.2022
REV. V 02

Karma ERGOLITE KM-2501 je v současné době jedním z nejllehčích vozíků na trhu.

Doporučuje se především pro převoz pacienta v případech, kdy se musí často skládat.

Mechanický vozík standardní konstrukce rámu, rám vozíku je hliníkový o nosnosti **100 kg**.

Vozík je dodáván v šířkách sedačky 41 nebo 46 cm. Potah sedáku a zádové opěrky vozíku jsou textilní a velmi prodyšné. Použitý textil má antibakteriální úpravu. Stupačky vozíku jsou dvoudílné, délkově nastavitelné, odklopitelné. Celková hmotnost vozíku je 7,8 kg.

Sedačka vozíku je "esovitě" prohnutá a díky tomu je i celodenní užívání vozíku velmi pohodlné. Zádovou opěrku je možno pro potřebu transportu "zlomit" - z obrázku níže je pak patrné, jak kompaktní je vozík složený pro transport. Potah sedáku a zádové opěrky vozíku je textilní, omyvatelný a velmi prodyšný. Vozík je doplněn odnímatelným polstrem. Zadní kola vozíku mají plný plášť o rozměru 14 x 1 3/8". Přední kola jsou plná o rozměru 6 x 1 3/8". Rám vozíku má metalický lak v barevné kombinaci antracit a stříbrná.

1. OBECNÉ INFORMACE

Invalidní vozík je určen pro osoby s dočasnou nebo trvalou indispozicí k samostatnému pohybu. Vozík mohou používat osoby váhy do **100 kg**. Přehled vlastností a dodatečného příslušenství vozíku je uveden v přehledu, který je součástí tohoto návodu.

Dříve než začnete invalidní vozík používat je nutné se seznámit s tímto návodem, je to důležité pro bezpečnost uživatele.

2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1) Nastupování a vystupování z vozíku je nutné provádět při seřazených brzdách a zabrzděném vozíku.

2) Během jízdy se nesmí používat brzdy (jen pouze pokud se vozík nepohybuje)! Netýká se to ruční brzdy používané osobou, která vozík tlačí (u typu, který to umožňuje).

3) Při naklánění dopředu, je nutné dávat pozor, aby se váha nepřemístila příliš dopředu. Abyste zvýšili stabilitu vozíku, před nakláněním dopředu je třeba se ujistit, že přední kola jsou nasměrovaná dopředu ve směru jízdy!

4) Nenaklánějte se příliš dopředu a také nevyklánějte se na bok vozíku!

POZOR: NADMĚRNÉ NAKLÁNĚNÍ DOPŘEDU NEBO NA BOK MŮŽE VÉST K VYPADNUTÍ Z VOZÍKU A PORANĚNÍ!

5) U nastupování a vystupování z vozíku nestávejte na podnožkách, může to vést k převrácení vozíku.

POZOR: STÁVÁNÍ NA PODNOŽKÁCH MŮŽE VÉST K PŘEVRÁCENÍ VOZÍKU A PORANĚNÍ!

6) U vjíždění na prahy nebo jiné překážky, u přenášení celé váhy na zadní kola, buďte opatrní. Pokud máte obavy, zda se Vám to podaří, obraťte se bezpodmínečně o pomoc na druhou osobu.

POZOR:

NEOBRATNÉ NEBO NEOPATRNÉ PŘENÁŠENÍ VÁHY NA ZADNÍ KOLA MŮŽE VÉST K PŘEVRÁCENÍ VOZÍKU DOZADU, CO JE VELICE NEBEZPEČNÉ A MŮŽE DOJÍT K VÁŽNÉMU PORANĚNÍ! V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLIV POCHYBNOSTÍ, ZDA JE BEZPEČNÉ PŘEKÁŽKU PŘEKONAT, OBRAŤTE SE BEZPODMÍNEČNĚ O POMOC NA DRUHOU OSOBU!

Vyvarujte se kontaktu vozíku s otevřeným ohněm. U přímého kontaktu textilních, plastových a gumových částí s ohněm, může dojít k jejich vznícení.

3. OBSLUHA

Zádovou opěrku je možno pro potřebu transportu "zlomit"

- vozík má skládací rám – vozík skládáme povytažením prostřední části sedačky směrem nahoru (nejdříve je nutné odepnout polštář, který je připevněn k sedačce suchým zipem), vozík se rozkládá přitlačením boků sedačky směrem dolů. **Je nutné dávat pozor, aby boky sedačky byly v plastových úchytkách. Nesprávné rozložení sedačky může vést k prasknutí úchytek a poškození vozíku.**

4. ÚDRŽBA

Vozík lze čistit a udržovat běžnými čistícími, dezinfekčními a konzervačními prostředky, které neobsahují rozpouštědla. Pro zachování maximální funkčnosti a stability doporučujeme pravidelně kontrolovat polohu všech jisticích prvků, stav koleček a pro plynulé a bezhlučné ovládání bovdenových brzd pravidelně promazat ovládací lanka, popř. odstranit mechanické nečistoty všech částí.

5. SERVIS A OPRAVY

V případě nutnosti odstranění závady nebo provedení servisu, kontaktujte prodejce, který Vám poskytne veškeré informace.

6. LIKVIDACE PRODUKTU

Při likvidaci použitého chodítka je nutné dodržovat příslušné předpisy pro likvidaci odpadu.

Důrazně doporučujeme kontaktovat vašeho místního autorizovaného dodavatele, který zajistí likvidaci vašeho vozíku.

NEŽADOUCÍ PŘÍHODA

V případě „vážného incidentu“ souvisejícího s produktem, který vede přímo nebo nepřímo, může nebo by mohla vést k některé z následujících událostí:

- a) úmrtí pacienta, uživatele nebo jiné osoby,
- b) dočasné nebo trvalé zhoršení zdravotního stavu pacienta, uživatele nebo jiné osoby,
- c) vážné ohrožení veřejného zdraví

tato „závažná událost“ musí být nahlášena výrobci a příslušnému orgánu členského státu, v němž má uživatel nebo pacient bydliště. V případě ČR je příslušným orgánem SÚKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv, Odbor zdravotnických prostředků. Uživatel /pacient jsou povinni písemně oznámit výrobci nebo zplnomocněnému zástupci a SÚKL jakoukoliv nežádoucí příhodu, která vznikla v souvislosti s použitím zdravotnického prostředku.

VAROVÁNÍ: V případě bolesti, alergických reakcí nebo jiných rušivých příznaků souvisejících s používáním zdravotnického prostředku, které jsou pro uživatele nejasné, se poraďte s lékařem.

PROHLÁŠENÍ

Na tento výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě s Nařízením (EU) MDR 2017/745 v platném znění a ve shodě s legislativními požadavky ČR na zdravotnické prostředky v platném znění.