

ZÁRUČNÍ LIST

Datum prodeje:

Razítko a čitelný podpis prodávajícího:

- 1) Firma Ortgroup Medical s.r.o., 1. Máje 3236/103, 703 00 Ostrava – Vítkovice tímto dává záruku na výrobek 2 roky ode dne vydání zboží kupujícím.
- 2) V záruční době se Ortgroup Medical s.r.o. zavazuje vykonat nevyhnutelné opravy za účelem možnosti opětovného používání zboží v termínu do 30dní od obdržení reklamace.
- 3) Ortgroup Medical s.r.o. si vyhrazuje právo výměny zboží v případě, že náklady na opravu uzná za nerentabilní.
- 4) V případě zjištění nesprávného fungování zboží je potřebné jej bezodkladně odeslat na adresu Ortgroup Medical s.r.o. – viz bod 1 nebo kontaktovat prodejce.
- 5) Před použitím výrobku je potřeba se seznámit s návodem na použití a řídit se instrukcemi v něm uvedenými. Použití výrobku v rozporu s jeho určením ztrácí nárok na záruku.
- 6) Záruka se nevztahuje na poškození vzniklé ostrým předmětem, poškození vzniklé v důsledku působení vnějších mechanických sil, znečištění zboží mastnými substancemi či benzínem.
- 7) TENTO ZÁRUČNÍ LIST JE PLATNÝ VÝLUČNĚ SPOLU S DOKLADEM O KOUPI. V PŘÍPADĚ REKLAMACE PROSÍME O PŘILOŽENÍ DOKLADU O KOUPI.
- 8) Reklamáce bez dokladu o koupi nebudou akceptované.

Výrobce:

ANTAR Sp. J.
I.Groniecka-Tarnkowska, A.Tarnkowski
ul. Zawiańska 43
03-068 Warszawa, Polsko



Distribuce:

Ortgroup Medical s.r.o., 1. Máje 3236/103, 703 00 Ostrava - Vítkovice
E-mail: ortgroup@ortgroup.cz, www.ortgroup.cz
Tel.: 596 630 615

NÁVOD K POUŽITÍ

CHODÍTKO KOLOVÉ

AT02008, AT02009



POUŽITÍ:

Chodítko je součástí řady kompenzačních pomůcek, určených pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Chodítko je určeno pro oporu a odlehčení dolních končetin při chůzi, nácvičce chůze, poúrazových a pooperačních stavech a následné rehabilitaci. Je vhodné též pro transport drobných předmětů.

POPIS:

Skládací rám chodítka je vyrobený z povrchově upravených duralových trubek vysoké pevnosti. Rám je doplněn čtyřmi kolečky (třemi u typu AT02009), z nichž přední mají uložení v otočné vidlici a ergonomickými výškově nastavitelnými rukojetmi. Kolečka umožňují posunování chodítka a to tak, že silně uchopíte rukojeti chodítka a lehce tlačíte dopředu. Chodítko je vybaveno bowdenovými brzdami s možností aretace. Chodítko je vybaveno sedátkem a opěrkou zad.

TECHNICKÉ PARAMETRY:

	AT02008	AT02009
nastavitelná výška madel v cm	77-94	77-95
výška sedátka	x	54
šířka rozloženého chodítka	66	64
průměr kolečka (přední) v cm	19,5	19,5
průměr kolečka (zadní) v cm	17	19,5
hmotnost (kg)	5,5	7,4
nosnost (kg)	135	135

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:

Před používáním chodítka konzultujte jeho vhodnost s ošetřujícím lékařem. Před používáním chodítka si pečlivě přečtěte návod k použití a v případě nejasností kontaktujte vašeho dodavatele. Uživatel chodítka musí dbát zvýšené opatrnosti. Uživatel se musí přemísťovat takovým způsobem, aby chodítko od něj neodjelo příliš daleko, jinak může dojít k převrácení. Při transportu nepoužívejte chodítko k sezení, chodítko nepřetěžujte a nepřekračujte maximální nosnost 135 kg. Při skládání a rozkládání postupujte opatrně, aby nedošlo k zachycení a úrazu prstů. Je-li chodítko v klidu, vždy zaaretujte brzdy. Při užívání chodítka musí být všechna kola v kontaktu s podkladem.

SLOŽENÍ A NASTAVENÍ CHODÍTKA:

- AT02008

Rám chodítka vyjměte z krabice a stlačením přední a zadní části od sebe rám

rozložte. Madla vložte do otvorů v horní části rámu a nastavte požadovanou výšku madel, upevněte pomocí šroubů. Brzdová lanka by měla vézt zevně rámu i madel. Zasuňte opěrku zad zmáčknutím pojistek. Nasadte vidlice s kolečky do otvorů na spodní části rámu a upevněte šrouby. Nakonec nasadte tašku, která se volně zavěsí na rám chodítka pod sedátkem.

Po odklopení boční pojistky, případně uvolnění dalšího jistícího prvku a následném zatlačení na blokovací kloubovou vzpěru, lze rám chodítka jednoduchým způsobem složit do transportní polohy.

- AT02009

Rám chodítka vyjměte z krabice, rozložte směrem od sebe až do polohy, která je vymezena blokovací kloubovou vzpěrou v horní části a následně zapřením jistícího šroubu zajistíte chodítko proti samovolnému složení. Brzdová lanka by měla vézt zevně rámu i madel.

BRZDY:

Před každým použitím vyzkoušejte správnou funkci brzd. Při stlačení páky brzdy směrem nahoru by chodítko mělo přibrzdit až úplně zastavit. Stačením páky směrem dolů by se brzdy měly zaaretovat. Opačným způsobem brzdy odblokujte. Vždy používejte obě brzdy současně.

ÚDRŽBA:

Chodítko lze čistit a udržovat běžnými čistícími, dezinfekčními a konzervačními prostředky, které neobsahují rozpouštědla. Pro zachování maximální funkčnosti a stability doporučujeme pravidelně kontrolovat polohu všech jistících prvků, stav koleček a pravidelně promazávat ovládací lanka brzd, ev. odstraňovat mechanické nečistoty všech částí.

SERVIS A OPRAVA:

V případě nutnosti odstranění závady nebo provedení servisu, kontaktujte prodejce, který vám poskytne veškeré informace.

ZÁRUKA:

Záruka se poskytuje po dobu 24 měsíců od data převzetí pomůcky a nevztahuje se na poškození vlivem nesprávného použití a opotřebení, způsobené obvyklým užíváním. Záruka zaniká také při jakékoliv úpravě, opravě, seřízení nebo výměně jakékoliv části jiným subjektem než výrobcem či dovozcem (viz níže) nebo prodávajícím.